



HYPOTHERMIE HANDSCHUHE

Anwendungsgebiete

Vorbeugung gegen Onycholyse und Haut Toxizität aufgrund der Behandlung mit Docetaxel.

Gegenanzeigen

- Raynaud-Syndrom
- distale Metastasen
- distale Arteriopathie
- Kälteüberempfindlichkeit

Produktbeschreibung

Die Elasto-Gel Hypothermie Handschuhe bestehen aus einem Glyzerin-basierten Hydrogel, das seine Weichheit / Geschmeidigkeit auch tiefgefroren behält. Das Obermaterial ist aus wasserfestem, dehnbarem Gewebe. Das Band am Handgelenk sorgt dafür, dass der Handschuh seine Position behält.

Gebrauchsanweisung (*)

1. Legen Sie die Handschuhe in einer Plastiktüte für mindestens 12 Stunden in ein Tiefkühlfach bei -18° bis -30° C. Die Handschuhe können bis zum Gebrauch unbegrenzt im Tiefkühlfach bleiben. Sie bleiben auch bei -30°C flexibel. Wenn der Kühlschrank abgetaut wird, nehmen Sie das Produkt bitte vorher heraus.
2. Bitte benutzen Sie aus hygienischen Gründen die Einweg-Vlieshandschuhe unter den Hypothermie Handschuhen.
3. Ziehen Sie die Handschuhe 15 min vor der Behandlung an und 15 min danach aus. Nach 45 min sollte das Paar Handschuhe gewechselt werden.

(*) Dr. F. Scotté, et al., Journal of Clinical Oncology, 2004 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 22, N° 14S (July 15 Supplement), 2004: 8003

Wichtige Hinweise

Der Wechsel der Handschuhe sollte so schnell wie möglich vonstatten gehen, um einen Vasodilatationsreflex zu vermeiden. Die Handschuhe müssen bei jeder Therapiesitzung getragen werden, da eine Unterbrechung ihre Wirkung beeinträchtigen könnte.

Lassen Sie die Handschuhe nach Gebrauch trocknen, bevor Sie für den nächsten Gebrauch wieder tiefgekühlt werden.

Reinigungshinweise

Wischen Sie die Handschuhe mit Seife und Wasser ab, dann abspülen und trocknen. Tränken Sie die Handschuhe niemals in Wasser.

Garantie

Elasto-Gel Hypothermie Handschuhe haben eine Garantiezeit von 6 Monaten beginnend mit dem Erwerbsdatum.

Vertrieb Deutschland

velo medizinprodukte gmbh Lohweg 17 D-92369 Sengenthal – Reichertshofen
Fon 09181/261412 Fax 09181/261413 velo@medizinprodukte.com www.velo-medizinprodukte.com



EU Authorized Representative: M. Devices Group - Marlborough House - Riding Street - Southport - PR8 1EW – United Kingdom - Tel: +44 1704 544 944 - Fax: +44 1704 544 050

Manufactured in the USA by: southwest technologies, inc. • 1746 Levee Road • North Kansas City, MO 64116 • Tel: +1 816 221 2442 • Fax: +1 816 221 3995